



So wechseln Sie Ihren **AQUACEL® Extra** Wundverband zu Hause

Warum muss ich meinen Wundverband wechseln?

Ein Wundverband ist dafür ausgelegt, einen Bereich abzudecken und zu schützen, um die Wunde sauber zu halten. Der Wundverband fungiert als Barriere, um die Menge an Bakterien zu verringern, die in die Wunde gelangen und die zu einer Infektion führen können.

Wann muss ich meinen Wundverband wechseln?

Sie sollten Ihren Wundverband nach den Vorgaben Ihres Arztes und Ihrer medizinischen Fachkraft wechseln oder wenn ihr Wundverband beginnt durchzunässen.

Diese Hinweise zeigen Ihnen, wie Sie den **AQUACEL® Extra** Wundverband richtig anwenden.



Es ist wichtig, dass die Wunde immer mit einem Wundverband bedeckt ist, um das Risiko einer Infektion zu verringern.



Was ist der **AQUACEL® Extra** Wundverband?

AQUACEL® Extra ist ein Wundverband mit Hydrofiber® Technologie, der für den direkten Kontakt mit der Wunde entwickelt wurde. Der Wundverband bildet ein weiches Gel, sobald er mit Wundflüssigkeit in Kontakt kommt. Diese Gelbildung ist erwünscht und trägt dazu bei, die überschüssige Wundflüssigkeit aufzunehmen und Ihre Wunde sauber zu halten. Diese Eigenschaften unterstützen den Heilungsprozess.

Vor dem Verbandwechsel

1. Handhygiene



Waschen Sie die Hände mit Wasser und Seife.
Danach gründlich mit einem sauberen Handtuch abtrocknen.

2. Legen Sie die benötigte Ausrüstung bereit.



Saubere Einmalhandschuhe, 3 Paar



Spiegel zum Betrachten der Wunde (bei Bedarf)




Pflasterlöser (bei Bedarf)



Einweg-Müllbeutel für benutzte Wundverbände



Wundspüllösung und sterile Kompressen

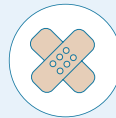

Wundverband



Feuchtigkeitshautpflege (nach Bedarf)



Klebeband und saubere Schere

3. Vorherigen Wundverband entfernen und entsorgen





Entfernen Sie den Wundverband mit sauberen Handschuhen und entsorgen Sie ihn in einem Plastikbeutel.
Danach Handschuhe entsorgen.

Verbandanlage




1 Hände waschen / Handschuhe

Waschen Sie die Hände mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie gründlich mit einem sauberen Handtuch ab. Legen Sie dann saubere Handschuhe an.

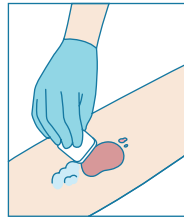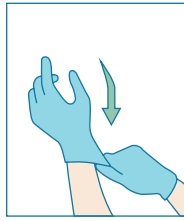


2 Wunde reinigen

Reinigen Sie Ihre Wunde von innen nach außen mit einer sterilen Kompresse und einer Wundspüllösung, die Ihnen von Ihrem Arzt oder medizinischer Fachkraft empfohlen wurde.

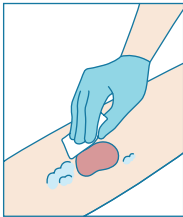

3 Haut abtrocknen



Achten Sie darauf, dass die Haut an den Wundrändern sauber und trocken ist. Bitte die Wundumgebung nicht tupfen, sondern wischen. Dabei pro Wischvorgang eine neue sterile Kompresse verwenden. Danach Handschuhe entsorgen.

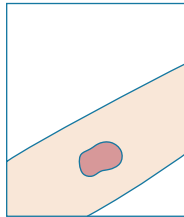

4 Hände waschen / Handschuhe wechseln


5 Wundverband öffnen

Öffnen Sie vorsichtig die Verpackung mit dem **AQUACEL® Extra** Wundverband und versuchen Sie, diesen so wenig wie möglich zu berühren.

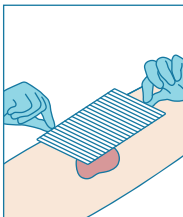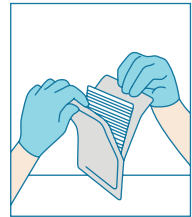

6 Wundverband anlegen

Legen Sie den **AQUACEL® Extra** Wundverband direkt auf die Wunde. Der Wundverband soll die Wundränder um mindestens 1 cm überlappen. (Bei Bedarf kann der Wundverband zugeschnitten werden).

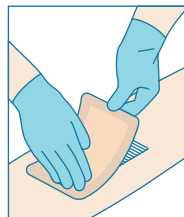

7 Wundverband fixieren und sichern

Legen Sie einen fixierenden Schutzverband an, um den **AQUACEL® Extra** Wundverband auf der Wunde zu befestigen. Bitte folgen Sie bei der Auswahl der Fixierung der Anweisung Ihres Arztes oder medizinischen Fachkraft.



Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie folgende Symptome beobachten:

- Neue oder sich vergrößende Wunde
- Neue oder sich ausbreitende Rötung oder Schwellung der wundumgebenden Haut
- Neue oder stärkere Schmerzen
- Neuer oder stärkerer Geruch nach dem Reinigen der Wunde
- Mehr Wundexsudat (Flüssigkeit, die aus der Wunde austritt) als bisher

Vorsichtsmaßnahmen

- Kein Wundverband darf länger als 7 Tage auf der Wunde verbleiben, ohne gewechselt zu werden.
- Sollte der Wundverband sich nur schwer entfernen lassen, benetzen Sie ihn großzügig mit steriler Kochsalzlösung und lassen Sie diese etwas einweichen.
- Nicht verwenden, wenn die Einzelverpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Bei Raumtemperatur und trocken lagern.

Weitere Hinweise zu Einsatzgebieten und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte den Anwendungshinweisen auf dem Beipackzettel.

Mit den nebenstehenden PZN-Nummern (D), den REF (A) und den Pharmacodes (CH) stellen Sie sicher, dass Sie den Original-Wundverband von ConvaTec erhalten haben.

AQUACEL[®] Extra[™]

Gelbildende Wundauflage mit zuverlässigem Wundrandschutz

Größe	Packungs-inhalt	PZN (D)	REF (A)	Pharma-code (CH)
AQUACEL[®] Extra[™] Wundauflage				
5 x 5 cm	10 Stück	090 788 31	420 671	780 38 32
10 x 10 cm	10 Stück	090 788 48	420 672	780 38 33
15 x 15 cm	5 Stück	090 788 54	420 673	780 38 34
20 x 24 cm	5 Stück	172 844 21	–	–
5 x 10 cm	10 Stück	–	420 825	–
4 x 10 cm	10 Stück	087 465 90	–	557 20 08
4 x 20 cm	10 Stück	087 466 15	420 821	557 20 14
4 x 30 cm	10 Stück	087 466 21	420 822	557 20 20
AQUACEL[®] Tamponade				
1 x 45 cm	5 Stück	065 854 38	420 127	488 83 47
2 x 45 cm	5 Stück	072 522 88	403 770	473 44 72

Weitere Informationen

Diese Broschüre wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen Ihren Wundverband sicher und korrekt anzulegen und zu entfernen. Wenn Sie weiteren Rat zur Anwendung benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Ihre medizinische Fachkraft.

Zusätzliche Informationen zu ConvaTec Wundverbänden finden Sie auf unseren Internetseiten:

 www.convatec.de/wundversorgung

 www.convatec.at/wundversorgung

 www.convatec.ch/wundversorgung

