



For Life Produktions- und  
Vertriebsgesellschaft für Heil- und  
Hilfsmittel mbH  
Wendenschloßstraße 142, D-12557 Berlin



Service-Hotline: 0800-8722436  
[www.forlife.info](http://www.forlife.info)

## Gebrauchsanweisung für Urinal-Kondom unsteril

**Gültig für: KUK, KUS und KUL**

**Versionsnr.: KU.07.17    Freigabedatum: 07.2017    Revisionsnr.: 2**

### **Beschreibung:**

Das Produkt besteht aus Silikon und ist wie ein Kondom mit einem Fortsatz, zur Befestigung des Schlauches vom Urinbeutel zu verwenden. Die Innenseite der externen Ableitung ist mit einem leicht zu entfernenden Klebstoff versehen. Es handelt sich um ein Medizinprodukt der Klasse I und ist unsteril.

### **Indikation:**

Die Ableitung für Männer ist zu benutzen wie ein Kondom. Durch die Form der externen Ableitung hat der Patient keine Irritationen in der Harnröhre und die Versorgung ist einfach zu entfernen.

### **Kontraindikation:**

Nein

### **Nebenwirkungen:**

Es kann zu allergischen Reaktionen aufgrund des Klebstoffes kommen.

### **Messfunktion:**

Nein

### **Gebrauchsanweisung:**

- Vor dem Gebrauch die Hände waschen.
- Den Penis waschen, abtrocknen und anschließend den Penischaft rasieren.
- Das Kondom entlang des Penischaftes entrollen und sicherstellen, dass es komplett entrollt ist.
- Den Urinbeutel am Bein des Patienten, dem Bett oder dem Rollstuhl fixieren, bevor der Schlauch mit dem Fortsatz des Urinal-Kondoms verbunden wird. Dies beugt einem Verdrehen des Schlauches oder des Kondoms vor und ist für den Patienten bequemer.
- Den Schlauch des Urinbeckens mit dem Fortsatz des Kondoms verbinden. Das Ventil des Urinbeckens muss verschlossen sein.
- Zum Entfernen das Urinal-Kondom vom Schaft des Penis abrollen.
- Um das Urinal-Kondom einfacher zu entfernen, kann warmes Wasser mit Seife und einem Waschlappen oder ein Klebstoff entfernendes Spray genutzt werden.
- Das Urinal-Kondom im Müll entsorgen und anschließend die Hände waschen.

### **Sicherheitshinweise:**

- Vor der Benutzung die korrekte Größe bestimmen.
- Nur für den Einmalgebrauch.
- Nach dem Gebrauch im Müll entsorgen.
- Nicht benutzen, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt wurde.
- Nicht in direktem Sonnenlicht, bei extremen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit lagern.



For Life Produktions- und  
Vertriebsgesellschaft für Heil- und  
Hilfsmittel mbH  
Wendenschloßstraße 142, D-12557 Berlin




Service-Hotline: 0800-8722436  
[www.forlife.info](http://www.forlife.info)

## Bedeutung der Symbole auf der Verpackung



Unsteril

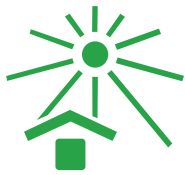

Von Sonnenlicht fernhalten



Latexfrei



Trocken aufbewahren



Temperaturbegrenzung



Nicht wiederverwenden



Hersteller



Herstellungsdatum



Verwendbar bis



Konform zur 93/42/EWG



Artikelnummer



Chargencode



Gebrauchsanweisung  
beachten



Achtung



Hände waschen

**LOT** 16748

 2017-03

 2022-02