

TRACHEOCUR® COMPRESSES



Art.-Nr. Art.-Bez.

T1130XX **TRACHEOCUR® Compress** (mit/ohne Aluminiumbedampfung, Vlies, Vlies beschichtet; alle Varianten jeweils geschlitzt oder gelocht; mini)

T114XXX **TRACHEOCUR® BI-Compress** (mit/ohne Aluminiumbedampfung, geschlitzt, geschlitzt Sichelform oder gelocht)

T11600X **TRACHEOCUR® Foam-Compress** (geschlitzt oder gelocht; mini)

(X = diverse Art.-Nr.)















Vertrieb durch:

For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH
Am Studio 16 · 12489 Berlin · www.forlife.info
Kundenservice Telefon: 0800 8722436

 BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH · Gewerbegebiet Bitzen 23 · 53804 Much
Telefon: +49 2245 610940 · info@bmv-med.de · www.bmv-med.de

Produkt „Made in Germany“

Piktogramm-Legende

	Hersteller		CE-Kennzeichnung		Trocken aufbewahren
	Katalognummer		Nicht wiederverwenden		Packungsinhalt
	Chargenbezeichnung		Verwendbar bis		Gebrauchsanweisung beachten oder elektronische Gebrauchs- anweisung beachten
	Eindeutige Produktidentifizierung		Vor Sonnenlicht schützen		
	Medizinprodukt				

Die Gebrauchsanweisung dient der Information von Arzt, Pflegepersonal und Patient/Anwender zur fachgerechten Handhabung. Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen und für die weitere Verwendung aufbewahren.

Zweckbestimmung

TRACHEOCUR® Compresses/BI-Compresses/Foam-Compresses dienen als mechanische Barriere zur Abpolsterung zwischen Tracheostoma und Kanülschild und zur Absorption von Trachealsekret. TRACHEOCUR® Compresses können sowohl bei tracheotomierten als auch laryngektomierten Patienten eingesetzt werden.

Kontraindikationen

Bei einer allergischen Reaktion auf Aluminium darf keine der aluminiumbedampften TRACHEOCUR® Compresses verwendet werden!

Keine der aluminiumbedampften TRACHEOCUR® Compresses darf während einer Bestrahlung getragen werden!

Warnhinweise

Sollten Hautirritationen (z. B. Juckreiz oder Rötungen) auftreten, ist das Produkt sofort abzusetzen und ein Arzt zu konsultieren! Möglicherweise besteht in diesem Fall eine allergiebedingte Unverträglichkeit.

Bei einer Mehrfachverwendung oder zu langer Nutzung besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko.

Sicherheitshinweise

Weist eine TRACHEOCUR® Compress Beschädigungen auf oder ist die Funktionalität beeinträchtigt, darf sie nicht verwendet bzw. muss unverzüglich durch ein neues Produkt gleicher Art ersetzt werden!

TRACHEOCUR® Compresses dürfen nicht wiederverwendet werden!

Eine Reinigung und Wiederaufbereitung ist aus hygienischen Gründen nicht zulässig!

Beschreibung

Die TRACHEOCUR® Compresses werden unter der Trachealkanüle getragen und halten das Tracheostoma und die Kleidung trocken. Außerdem bilden sie einen Puffer zwischen der Trachealkanüle und der Haut. TRACHEOCUR® Compresses sind in verschiedenen Ausführungen und unterschiedlicher Saugkraft erhältlich. Zu beachten ist, dass keine der aluminiumbedampften TRACHEOCUR® Compresses während einer Bestrahlung getragen werden darf!

Nutzungsdauer

TRACHEOCUR® Compresses sind ausschließlich zur einmaligen Anwendung vorgesehen. Es wird empfohlen, die TRACHEOCUR® Compresses aus hygienischen Gründen alle 12 Stunden, bei starker Sekretion auch mehrmals täglich, zu wechseln.

Anwendung

Bevor die TRACHEOCUR® Compress verwendet wird, ist die entsprechende Hautfläche zu reinigen, z.B. mit TRACHEOCUR® Stoma Clean, Art.-Nr. T123002. Zur anschließenden Verwendung der TRACHEOCUR® Compress muss die Trachealkanüle mit einem Kanülentrageband getragen werden. So werden Druckstellen und das Herausrutschen der Trachealkanüle vermieden. ACHTUNG! Bitte beachten Sie beim Einsetzen der Trachealkanüle die Anwendungshinweise des Trachealkanülenherstellers!

Die Abbildungen 1 und 2 verdeutlichen das Anlegen der TRACHEOCUR® Compresses. Beim Anlegen ist Folgendes zu beachten: Die aluminiumbedampfte Seite der entsprechenden TRACHEOCUR® Compresses muss zur Haut hin zeigen (Abbildung 3). Bei allen anderen TRACHEOCUR® Compresses gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden Seiten.

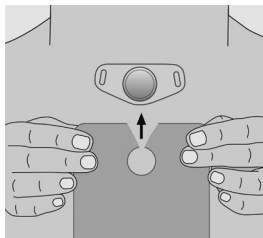


Abbildung 1

TRACHEOCUR® Compress geschlitzt. Durch den Einschnitt an der Öffnung lässt sich die geschlitzte TRACHEOCUR® Compress einsetzen, ohne die Trachealkanüle herauszunehmen.

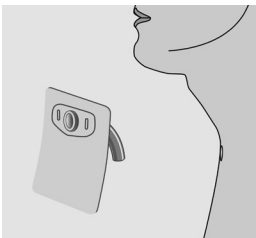


Abbildung 2

TRACHEOCUR® Compress gelocht. Bei der gelochten TRACHEOCUR® Compress wird die Trachealkanüle vor dem Einsetzen durch die Lochung geführt.

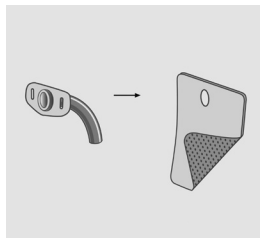


Abbildung 3

TRACHEOCUR® Compress aluminiumbedampft. Es ist darauf zu achten, dass die aluminiumbedampfte Seite zur Haut hin getragen wird.

Lagerung

Das Produkt ist trocken aufzubewahren und vor Sonnenlicht zu schützen.

Entsorgung

Die Entsorgung des Produktes darf nur entsprechend den geltenden nationalen Bestimmungen für Abfallprodukte vorgenommen werden.

Rechtliche Hinweise

Bei Änderungen am Produkt durch den Anwender sowie Anwendungen außerhalb des in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anwendungsbereiches erlischt der Garantie- und Haftungsanspruch dem Hersteller gegenüber.

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.