

Art.-Nr. T1110XX, Art.-Bez. TRACHEOCUR® Vario (beige/weiß, Kunststoff-/Metallhaken, Klettverschluss)
(X = diverse Art.-Nr.)

Die Gebrauchsanweisung dient der Information von Arzt, Pflegepersonal und Patient/Anwender zur fachgerechten Handhabung. Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen und für die weitere Verwendung aufbewahren.

Produkt „Made in Germany“

Vertrieb durch: For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH
Am Studio 16 · 12489 Berlin, Germany · www.forlife.info · Kundenservice Telefon: 0800 8722436

BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH · Gewerbegebiet Bitzen 23 · 53804 Much, Germany
Telefon: +49 2245 610940 · info@bmv-med.de · www.bmv-med.de

920298 Rev. DE0B 2022-08-18

Piktogramm-Legende



Hersteller



Eindeutige
Produktidentifizierung



Verwendbar bis



Packungsinhalt



Katalognummer



Medizinprodukt



Vor Sonnenlicht
schützen



Gebrauchs-
anweisung
beachten oder
elektronische
Gebrauchs-
anweisung
beachten



CE-Kennzeichnung



Trocken
aufbewahren



Zur Wiederverwendung
an einem einzelnen
Patienten



Chargenbezeichnung

Zweckbestimmung

TRACHEOCUR® Vario dienen zur Befestigung und Sicherung einer Trachealkanüle im Tracheostoma von tracheotomierten oder laryngektomierten Patienten.

Kontraindikationen

Das TRACHEOCUR® Vario mit Metallhaken darf während einer Bestrahlung **NICHT** verwendet werden.

Warnhinweise

Ein zu strammes Anlegen des TRACHEOCUR® Vario elastisch kann zu Druckstellen am Hals führen!

Wenn die Trachealkanüle durch falsches Anbringen des TRACHEOCUR® Vario nicht richtig sitzt, kann es zu Druckstenosen in der Trachea kommen!

Es besteht die Gefahr von Infektionen, wenn das TRACHEOCUR® Vario nicht im vorgegebenen Zeitraum gewechselt wird!

Ein zu strammes Anlegen des TRACHEOCUR® Vario kann zu Druckstellen am Hals führen!

Sicherheitshinweise

Weist das TRACHEOCUR® Vario elastisch Beschädigungen auf oder ist die Funktionalität beeinträchtigt, darf es nicht verwendet bzw. muss unverzüglich entfernt und durch ein neues Produkt gleicher Art ersetzt werden!

Jeglicher Wiedereinsatz bei anderen Patienten, auch nach einer Reinigung des TRACHEOCUR® Vario ist unzulässig!

NUR das TRACHEOCUR® Vario mit Kunststoffhaken oder Klettverschluss kann auch während einer Bestrahlung verwendet werden!

Um ein unbeabsichtigtes Lösen des TRACHEOCUR® Vario und dadurch ein Herausrutschen der Trachealkanüle zu vermeiden, ist unbedingt auf den korrekten Sitz des TRACHEOCUR® Vario zu achten!

Beschreibung

Das TRACHEOCUR® Vario wird zur Befestigung und Sicherung einer Trachealkanüle im Tracheostoma eingesetzt. Das TRACHEOCUR® Vario ist ein einteiliges Kanülentrageband mit Haken- oder Klettverschluss, welches individuell auf die Halsweite einstellbar ist. Durch die Art der Befestigung des TRACHEOCUR® Vario lässt sich dieses im Notfall schnell öffnen.

Das TRACHEOCUR® Vario mit Kunststoffhaken oder Klettverschluss kann auch während einer Bestrahlung verwendet werden.

Nutzungsdauer

Das TRACHEOCUR® Vario elastisch ist ein Ein-Patienten-Produkt, welches bei einem einzelnen Patienten auch zur Mehrfachanwendung bestimmt ist.

Das TRACHEOCUR® Vario muss täglich, spätestens alle 24 Stunden, ausgewechselt werden. Ist das TRACHEOCUR® Vario mit Sekret verunreinigt, kann ein früherer Wechsel notwendig sein.

Die Dauer der Verwendung des TRACHEOCUR® Vario unterliegt verschiedenen Einflüssen. Hier sind die Anwendung und die gründliche Reinigung sowie die Aufbewahrung von besonderer Bedeutung. Es wird empfohlen, das TRACHEOCUR® Vario bei entsprechender regelmäßiger Reinigung nach 1 Monat durch ein neues TRACHEOCUR® Vario zu ersetzen.

Anwendung

Vor der Anwendung des TRACHEOCUR® Vario **MUSS** geprüft werden, dass die Trachealkanüle sicher im Tracheostoma sitzt. Hierfür sind die Anwendungshinweise des Trachealkanülenherstellers zu beachten!

Anschließend wird das TRACHEOCUR® Vario angelegt und befestigt. Dabei ist darauf zu achten, dass der Klettverschluss/ die Haken nach außen geführt werden, um Druckstellen zu vermeiden (Abbildung 1). Abhängig von der Variante des verwendeten TRACHEOCUR® Vario kann dieses nach dem Anlegen mit Hilfe eines Klettverschlusses und/oder über einen integrierten Verstellmechanismus auf die individuelle Halsweite eingestellt werden (Abbildung 2).

Um ein unbeabsichtigtes Lösen des TRACHEOCUR® Vario und dadurch ein Herausrutschen der Trachealkanüle zu vermeiden, ist unbedingt auf den korrekten Sitz des TRACHEOCUR® Vario zu achten! Ein korrekter Sitz des TRACHEOCUR® Vario ist gegeben, wenn die Trachealkanüle korrekt im Tracheostoma sitzt (d.h. dass das Kanülenschild der Trachealkanüle auf der Haut oder der Trachealkompresse aufliegt) und das fixierte TRACHEOCUR® Vario so eingestellt ist, dass zwei Finger bequem zwischen Hals (Haut) und Trageband passen (= empfohlener Abstand von 1 cm zwischen Hals und Trageband).

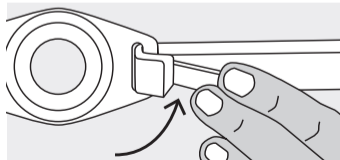


Abbildung 1: Befestigung des TRACHEOCUR® Vario mit Klettverschluss

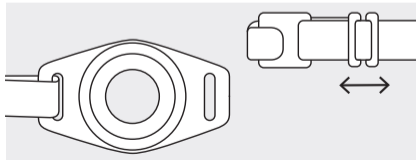


Abbildung 2: Einstellen des TRACHEOCUR® Vario auf die Halsweite durch den integrierten Verstellmechanismus (siehe Pfeile).

Reinigung

Zur Reinigung wird das getragene TRACHEOCUR® Vario bei 30° in der Waschmaschine oder per Handwäsche mit einem Pflegewaschmittel gewaschen. Es ist darauf zu achten, dass das TRACHEOCUR® Vario erst nach vollständiger Trocknung wieder zu verwenden ist.

Lagerung

Das TRACHEOCUR® Vario ist trocken aufzubewahren und vor Sonnenlicht zu schützen.

Entsorgung

Die Entsorgung des Produktes darf nur entsprechend den geltenden nationalen Bestimmungen für Abfallprodukte vorgenommen werden.

Rechtliche Hinweise

Bei Änderungen am Produkt durch den Anwender sowie Anwendungen außerhalb des in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anwendungsbereiches erlischt der Garantie- und Haftungsanspruch dem Hersteller gegenüber.

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.