

# TRACHEOCUR® SCHUTZTEXTILIEN

**Art.-Nr. T131XXX-BMLX, Art.-Bez. TRACHEOCUR® Protection bib** (Erwachsene/Kinder, Klettverschluss, diverse Farben, mehrlagig)

**Art.-Nr. T13200X-BMTXXX(X), Art.-Bez. TRACHEOCUR® Protection cloth** (Erwachsene/Kinder, Klettverschluss, diverse Farben/Materialien)

**Art.-Nr. T133001-BMRSR(X), Art.-Bez. TRACHEOCUR® Protection roll neck S Zip** (Shirtform, Reißverschluss, diverse Farben)

**Art.-Nr. T133101-BMRSX(X), Art.-Bez. TRACHEOCUR® Protection roll neck S** (Shirtform, diverse Farben)

**Art.-Nr. T133201-BMRX(X), Art.-Bez. TRACHEOCUR® Protection roll neck AD** (Klettverschluss, diverse Farben)

(X = diverse Art.-Nr.)

Die Gebrauchsanweisung dient der Information von Arzt, Pflegepersonal und Patient/Anwender zur fachgerechten Handhabung.

Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen und für die weitere Verwendung aufbewahren.

## Zweckbestimmung

TRACHEOCUR® Protection bib/Protection cloth/Protection roll neck dienen zum Schutz des Tracheostomas bei tracheotomierten oder laryngektomierten Patienten (Erwachsene/Kinder).

## Beschreibung

TRACHEOCUR® Protection bib/Protection cloth/Protection roll neck sind Schutztextilien und dienen dem Schutz des Tracheostomas. Sie verhindern, dass Staub- oder Schmutzpartikel in die Luftröhre gelangen und sorgen für eine ästhetische Abdeckung des Tracheostomas. Die verschiedenen Varianten der TRACHEOCUR® Schutztextilien sind nachfolgend aufgeführt:

TRACHEOCUR® Protection bib mit Klettverschluss:

- Diolentüllfutter als Sekretschutz (Polyester)
- Trageband (Baumwolle) und Klettverschluss (Polyamid 6/6), Halsweite über die verstellbaren Clips (Polycarbonat) einstellbar (Erwachsene: 35-45 cm, Kinder 28-35 cm)
- vier Stärken (3, 4, 8 und 12 Stofflagen)
- diverse Farben

TRACHEOCUR® Protection cloth mit Klettverschluss:

- Diolentüllfutter als Sekretschutz (Polyester)
- Material: Baumwolle, Polyester oder einer Baumwolle/Polyestermischung und Klettverschluss (Polyamid 6/6), Halsweite mit dem Klettverschluss einstellbar (Erwachsene: 33-42 cm, Kinder 28-34 cm)
- diverse Farben

TRACHEOCUR® Protection roll neck, mit/ohne Reißverschluss/Klettverschluss:

- Diolentüllfutter als Sekretschutz (Polyester)
- Material: Baumwolle oder Baumwolle/Viskose mit Elasthan
- diverse Farben

## Nutzungsdauer

Die TRACHEOCUR® Schutztextilien sind unsterile Ein-Patienten-Produkte, welche bei einem einzelnen Patienten auch zur Mehrfachanwendung bestimmt sind.

TRACHEOCUR® Schutztextilien müssen täglich, spätestens alle 24 Stunden, ausgewechselt werden. Sind die TRACHEOCUR® Schutztextilien mit Sekret verunreinigt, kann ein früherer Wechsel notwendig sein.

Die Dauer der Verwendung der TRACHEOCUR® Schutztextilien unterliegt verschiedenen Einflüssen. Hier sind die Anwendung und die gründliche Reinigung sowie die Aufbewahrung von besonderer Bedeutung. Es wird empfohlen, die TRACHEOCUR® Schutztextilien bei entsprechender regelmäßiger Reinigung nach 3 Monaten durch eine neue TRACHEOCUR® Schutztextilie zu ersetzen.

## Anwendung

Das TRACHEOCUR® Protection bib wird wie ein Halstuch getragen. Der Halsumfang kann über die verstellbaren Clips und den Klettverschluss eingestellt werden.

Das TRACHEOCUR® Protection cloth wird wie ein Halstuch getragen. Der Halsumfang kann über den Klettverschluss eingestellt werden.

Der TRACHEOCUR® Protection roll neck wird je nach Ausführung wie ein Lätzchen hinten mit einem Klettverschluss/seitlichem Reißverschluss geschlossen oder wie ein Shirt über den Kopf gezogen und unter dem Hemd oder der Bluse getragen.

## Reinigung

Zur Reinigung wird die TRACHEOCUR® Schutztextilie bei 30° in der Waschmaschine mit einem Pflegewaschmittel gewaschen. Klettverschlüsse beim Waschen geschlossen halten, um die Verschlusskraft zu erhalten. Die TRACHEOCUR® Schutztextilie ist erst nach vollständiger Trocknung zu lagern bzw. wieder zu verwenden!

## Kontraindikationen

Momentan sind für die TRACHEOCUR® Schutztextilien keine Kontraindikationen bekannt.

## Warnhinweise

Es besteht die Gefahr von Infektionen oder Hautirritationen, wenn die TRACHEOCUR® Schutztextilie nicht im vorgegebenen Zeitraum gewechselt wird, denn absorbierte Feuchtigkeit und Sekret können zu Bakterienwachstum führen!

Ein zu strammes Anlegen der TRACHEOCUR® Schutztextilie kann zu Druckstellen am Hals führen!

## Sicherheitshinweise

Weist eine TRACHEOCUR® Schutztextilie Beschädigungen auf oder ist die Funktionalität beeinträchtigt, muss diese entsorgt werden!

Jeglicher Wiedereinsatz bei anderen Patienten, auch nach einer Reinigung der TRACHEOCUR® Schutztextilie ist unzulässig!

Bei Schwierigkeiten mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter: 0800 8722436.

Sollte es durch die Anwendung des Produktes zu einer vorübergehenden oder dauerhaften schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod des Patienten, Anwenders oder Dritter kommen, melden Sie das Vorkommnis bitte umgehend an unseren Kundenservice unter Telefonnummer 0800 8722436 sowie an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 53175 Bonn (www.bfarm.de, Bereich Medizinprodukte, Risiken melden).

Bei Änderungen am Produkt durch den Anwender sowie Anwendungen außerhalb des in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anwendungsbereiches erlischt der Garantie- und Haftungsanspruch dem Hersteller gegenüber.

## Lagerung

TRACHEOCUR® Schutztextilien sind trocken aufzubewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.




## Entsorgung

Die Entsorgung des Produktes darf nur entsprechend den geltenden nationalen Bestimmungen für Abfallprodukte vorgenommen werden.

Produkt „Made in Germany“

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

## Piktogramm-Legende

 Hersteller	 CE-Kennzeichnung	 Trocken aufbewahren
 Artikelnummer	 Einzelner Patient – mehrfach anwendbar	 Packungsinhalt
 Fertigungslosnummer, Charge	 Verwendbar bis	 Gebrauchsanweisung beachten
 Einmalige Produktkennung	 Nicht steril	
 Medizinprodukt	 Vor Sonnenlicht schützen	

**FORLIFE**  
BERLIN

## Vertrieb durch:

For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH  
Am Studio 16 · 12489 Berlin · [www.forlife.info](http://www.forlife.info)

 BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH · Gewerbegebiet Bitzen 23 · 53804 Much  
Telefon: +49 2245 610940 · [info@bmv-med.de](mailto:info@bmv-med.de) · [www.bmv-med.de](http://www.bmv-med.de)