

Art.-Nr. T135001-01, Art.-Bez. TRACHEOCUR® Shower Save

Art.-Nr. T135001-02, Art.-Bez. TRACHEOCUR® Shower Save Kids

Art.-Nr. T135003-01, Art.-Bez. TRACHEOCUR® Shower Save 22

Die Gebrauchsanweisung dient der Information von Arzt, Pflegepersonal und Patient/Anwender zur fachgerechten Handhabung.

Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen und für die weitere Verwendung aufbewahren.

Zweckbestimmung

Der TRACHEOCUR® Shower Save schützt das Tracheostoma von tracheotomierten oder laryngektomierten Patienten (Erwachsene, Kinder) vor Spritzwasser. Der TRACHEOCUR® Shower Save für 22 mm Aufnahme ist mit einer Trachealkanüle mit 22 mm Aufnahme oder einem TRACHEOCUR® Base Special zu verwenden.

Beschreibung

Der TRACHEOCUR® Shower Save dient dem Schutz des Tracheostomas beim Duschen. Er verhindert, dass Spritzwasser in die Luftröhre gelangt. Abhängig von der Variante kann er bei Erwachsenen (TRACHEOCUR® Shower Save, TRACHEOCUR® Shower Save 22) oder Kindern (TRACHEOCUR® Shower Save Kids) angewendet werden.

Nutzungsdauer

Alle Varianten des TRACHEOCUR® Shower Save sind unsterile Ein-Patienten-Produkte, welche bei einem einzelnen Patienten auch zur Mehrfachanwendung bestimmt sind.

Die Dauer der Verwendung des TRACHEOCUR® Shower Save unterliegt verschiedenen Einflüssen. Hier sind die Anwendung und die gründliche Reinigung sowie die Aufbewahrung von besonderer Bedeutung. Es wird empfohlen,

den TRACHEOCUR® Shower Save bei entsprechender regelmäßiger Reinigung nach 3 Monaten durch einen neuen TRACHEOCUR® Shower Save zu ersetzen.

Anwendung

TRACHEOCUR® Shower Save/Shower Save Kids

Der TRACHEOCUR® Shower Save/Shower Save Kids wird über dem Tracheostoma um den Hals gelegt und mit dem Klettverschluss im Nacken verschlossen, so dass der TRACHEOCUR® Shower Save/Shower Save Kids ausreichend dicht anliegt. Im Falle des Vorhandenseins einer Trachealkanüle werden eventuell adaptierte Komponenten abgenommen und der TRACHEOCUR® Shower Save/Shower Save Kids über der Trachealkanüle angelegt. Ein Duschen ist jetzt möglich, wobei darauf zu achten ist, dass der Wasserstrahl niemals direkt auf den TRACHEOCUR® Shower Save/Shower Save Kids gerichtet wird. Durch den direkten Zufluss von Wasser kann es zu einer **lebensbedrohlichen Situation** kommen! Daher wird empfohlen, den Duschkopf maximal auf Brusthöhe zu halten/einzustellen.

TRACHEOCUR® Shower Save 22

Der TRACHEOCUR® Shower Save 22 wird in die 22 mm Aufnahme einer Trachealkanüle oder eines TRACHEOCUR® Base Special (Art.-Nr. T137030-XX) gesteckt, Abbildung 1. Ein Duschen ist jetzt möglich, wobei darauf zu achten ist, dass der Wasserstrahl niemals direkt auf den TRACHEOCUR® Shower Save 22 gerichtet wird. Durch den direkten Zufluss von Wasser kann es zu einer **lebensbedrohlichen Situation** kommen! Daher wird empfohlen den Duschkopf maximal auf Brusthöhe zu halten/einzustellen.

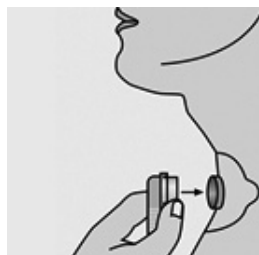


Abbildung 1:

Konnektion des TRACHEOCUR® Shower Save 22 auf ein TRACHEOCUR® Base Special (Art.-Nr. T137030-XX)

ACHTUNG: Bei Anwendung des TRACHEOCUR® Shower Save 22 kann sich dieser mit abgehustetem Sekret zusetzen. Die Atmung kann dadurch erheblich erschwert werden. In solchen Fällen ist der TRACHEOCUR® Shower Save 22 außerhalb der Dusche abzunehmen und zu reinigen.

Reinigung

Nach jeder Benutzung muss der TRACHEOCUR® Shower Save gründlich unter fließendem handwarmem Wasser (Trinkwasserqualität) gereinigt werden. Dafür kann zusätzlich eine pH-neutrale Waschlotion verwendet werden. Anschließend muss der TRACHEOCUR® Shower Save vollständig getrocknet werden, z. B. mit einem fusselfreien Tuch.

ACHTUNG: Es dürfen KEINE Haushaltsreiniger oder Desinfektionsmittel für die Reinigung des TRACHEOCUR® Shower Save verwendet werden!

Eine Reinigung durch Erhitzen, Auskochen oder Dampfsterilisation führt zu einer Beschädigung des TRACHEOCUR® Shower Save und ist somit nicht zulässig!

Kontraindikationen

Momentan sind für den TRACHEOCUR® Shower Save keine Kontraindikationen bekannt.

Warnhinweise

Der TRACHEOCUR® Shower Save darf **NICHT** zum Baden oder Schwimmen getragen werden! **LEBENSGEFAHR!!!**

Den Wasserstrahl der Dusche **NICHT** direkt auf den TRACHEOCUR® Shower Save richten! **LEBENSGEFAHR!!!**

Ein zu strammes Anlegen des TRACHEOCUR® Shower Save/Shower Save Kids kann zu Druckstellen am Hals führen!

Sollten bei der Anwendung des TRACHEOCUR® Shower Save unerwartete Nebenwirkungen auftreten, ist das Produkt sofort abzusetzen und ein Arzt zu konsultieren.

Sicherheitshinweise

Der TRACHEOCUR® Shower Save bietet nur Schutz vor Spritzwasser!

Weist der TRACHEOCUR® Shower Save Beschädigungen auf oder ist die Funktionalität beeinträchtigt, muss dieser entsorgt werden!

Jeglicher Wiedereinsatz bei anderen Patienten, auch nach einer Reinigung des TRACHEOCUR® Shower Save ist unzulässig.

Bei Anwendung des TRACHEOCUR® Shower Save 22 kann sich dieser mit abgehustetem Sekret zusetzen. Die Atmung kann dadurch erheblich erschwert werden. In solchen Fällen ist der TRACHEOCUR® Shower Save 22 außerhalb der Dusche abzunehmen und zu reinigen.

Es dürfen KEINE Haushaltsreiniger oder Desinfektionsmittel für die Reinigung verwendet werden!

Eine Reinigung durch Erhitzen, Auskochen oder Dampfsterilisation führt zu einer Beschädigung des TRACHEOCUR® Shower Save und ist somit nicht zulässig!

Bei Schwierigkeiten mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter: 0800 8722436.

Sollte es durch die Anwendung des Produktes zu einer vorübergehenden oder dauerhaften schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod des Patienten, Anwenders oder Dritter kommen, melden Sie das Vorkommnis bitte umgehend an unseren Kundenservice unter Telefonnummer 0800 8722436 sowie an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 53175 Bonn (www.bfarm.de, Bereich Medizinprodukte, Risiken melden).

Bei Änderungen am Produkt durch den Anwender sowie Anwendungen außerhalb des in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anwendungsbereiches erlischt der Garantie- und Haftungsanspruch dem Hersteller gegenüber.

Lagerung

Der TRACHEOCUR® Shower Save ist trocken aufzubewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.














Entsorgung

Die Entsorgung des Produktes darf nur entsprechend den geltenden nationalen Bestimmungen für Abfallprodukte vorgenommen werden.

Produkt „Made in Germany“

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

Piktogramm-Legende

	Hersteller
	Artikelnummer
	Fertigungslosnummer, Charge
	Einmalige Produktkennung
	Medizinprodukt
	CE-Kennzeichnung
	Einzelner Patient – mehrfach anwendbar
	Verwendbar bis
	Nicht steril
	Trocken aufbewahren
	Vor Sonnenlicht schützen
	Packungsinhalt
	Gebrauchsanweisung beachten



Vertrieb durch:

For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft
für Heil- und Hilfsmittel mbH · Am Studio 16
12489 Berlin · www.forlife.info



BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH
Gewerbegebiet Bitzen 23 · 53804 Much
Telefon: +49 2245 610940
info@bmv-med.de · www.bmv-med.de