



# Desinfektion

## Informationen zu MaiMed® MyClean Wipes Feuchttuchspendersystemen

**Empfohlene Methode** zur Befüllung und Aufbereitung der MaiMed® MyClean S Spendersysteme mit MaiMed® MyClean Wipes Vliestuchrollen unter hygienischen Bedingungen.

Zum Schutz vor Kontaminationen sollte die Arbeitsfläche vorsorglich mit MaiMed® MyClean DS/DS OA Schnelldesinfektion, MaiMed® MyClean FD Flächendesinfektion oder MaiMed® MyClean DS Schnelldesinfektionstüchern desinfiziert werden. Zudem sollte ein Schutzkittel und geeigneter Handschutz getragen werden; bei Bedarf zusätzlich eine Schutzbrille.

**Hinweis**  
Die dargestellten Abläufe und Einwirkzeiten können, je nach verwendetem Spendersystem und Desinfektionspräparat, von den Angaben anderer Hersteller abweichen.



### Schritt 1

Entfernen Sie den Deckel des MaiMed® MyClean S Feuchttuchspendersystems und befüllen Sie den leeren Spenderimer mit einer ausgepackten Vliestuchrolle MaiMed® MyClean Wipes. Ziehen Sie hierbei das innere Tuch ein Zentimeter aus der Vliestuchrolle heraus.

### Schritt 2

Gießen Sie, je nach verwendetem Spendersystem und Vliestuchrolle, 1,5–2,5 Liter gebrauchsfertige Desinfektionsmittellösung spiralförmig über die Vliestuchrolle. Achten Sie dabei auf eine möglichst vollständige Benetzung der Tuchrolle.

### Schritt 3

Anschließend ziehen Sie das innerste Tuch der Vliestuchrolle durch die Entnahmelasche des Spenderdeckels und werfen es weg. Setzen Sie nun den Deckel randgenau auf den Spenderimer und verschließen Sie das Spendersystem mit leichtem Druck, bis ein leichtes Klickgeräusch zu vernehmen ist. Verschließen Sie zudem auch die Entnahmevorrichtung mit der dafür vorgesehenen Schutzkappe.

### Schritt 4

Während Sie auf die Durchtränkung der Desinfektionstücher warten, können Sie das der Vliestuchrolle beiliegende Etikett vollständig ausfüllen und gut sichtbar auf dem Spendersystem befestigen. Folgende Eintragungen sind vorzunehmen: Produktname des Desinfektionsmittels, Chargennummer, Konzentration, Einwirkzeit, Datum der Befüllung sowie Haltbarkeitsdatum der Befüllung (max. Standzeit beträgt 28 Tage).

### Schritt 5

Nach 30 Minuten Wartezeit sind die Tücher vollständig durchtränkt und somit gebrauchsfertig. Nach ordnungsgemäßer Durchführung der 5 Schritte ist das MaiMed® MyClean Wipes Spendersystem gebrauchsfertig und für den Einsatz bereit.



1 Restliche Lösung entsorgen und Tücher wegwerfen



2 Reinigung und Desinfektion



3 Trocknung vor Wiederbefüllung

1. Nach Ablauf der vorgeschriebenen maximalen Standzeit von 28 Tagen sind etwaige Produktreste und nicht verbrauchte Tücher ordnungsgemäß zu entsorgen.

2. Im Anschluss muss das unbefüllte Spendersystem gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Hierzu empfehlen wir Ihnen die Verwendung von MaiMed® MyClean DS gebrauchsfertigen Desinfektionstüchern. Das Spendersystem ist beständig gegenüber herkömmlichen Desinfektionsmitteln und bis 65 °C spülmaschinenfest.

3. Nach vollständiger Reinigung und Aufbereitung des Spendersystems muss dieses vor der erneuten Befüllung vollständig trocken sein. Die Wiederbefüllung erfolgt gemäß der aufgeführten Schritte der Erstbefüllung.