



## INFORMATIONEN- BLATT FÜR PATIENTEN

### INDERMIL® flexifuze™\*\* Topischer Gewebekleber




Wenn Sie diese Karte erhalten haben, bedeutet dies, dass zum Verschluss Ihrer Wunde der topische Gewebekleber flexifuze™\*\* verwendet wurde. Die in dieser Packungsbeilage enthaltenen Informationen helfen Ihnen dabei, diese Verschlussmethode zu verstehen.

flexifuze™\*\* wird als Flüssigkeit auf die Haut aufgetragen und beginnt bei Kontakt mit der Hautoberfläche sofort fest zu werden. Nach vollständiger Trocknung erscheint der Klebstoff runzlig. Das ist völlig normal.

\* Eigentum von Connexicon Medical Ltd

# WUNDPFLEGE

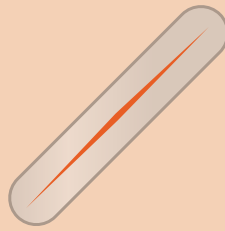

- Halten Sie die Wunde so trocken wie möglich, bis sich die Klebeschuttschicht nach 5–8 Tagen ablöst, und lassen Sie nur gelegentlich Wasser an die Wunde kommen.
- Sie können die Wundstelle sofort sanft abdschen und baden.
- Es sollte vermieden werden, direkt auf der Wunde zu reiben oder sie übermäßig in Wasser einzutauchen (einschließlich Schwimmen), bis sich die Klebeschuttschicht ablöst und die Wunde heilt.
- Ziehen oder kratzen Sie nicht an der Wunde oder am Verband.
- Tragen Sie keine Medikamente oder Creme auf die Wunde auf.
- Halten Sie die Wunde mit einem nicht klebenden, nicht medizinischen und wasserabweisenden Verband gemäß den Anweisungen Ihres Arztes trocken.
- Besprechen Sie eventuelle Beschwerden oder andere Bedenken bezüglich Ihrer Wunde mit Ihrem Arzt.

