



Gebrauchsanweisung

X-MKK-PM "Mitty Mini"

Pädiatrische Handschuh



Vorgesehener Anwender:

Dieses Medizinprodukt ist zur Verwendung durch medizinische Fachkräfte bestimmt.

Verwendungszweck:

Dieser Handschuh bietet eine gepolsterte Abdeckung um die Hand und die Finger, damit sich der Patient nicht selbst verletzen kann und die medizinische Behandlung nicht unterbrochen wird.

Anwendungshinweise:

- Babys oder Kinder, bei denen das Risiko besteht, dass lebenserhaltende Behandlungsmaßnahmen (z.B. durch Ziehen von Schläuchen) in Mitleidenschaft gezogen werden.
- Babys oder Kinder, bei denen das Risiko besteht, dass Kabel herausgezogen werden, was die Überwachung der Vitalparameter unterbinden könnte.
- Babys oder Kinder, deren versuchtes Ziehen, Kratzen oder Abschälen eine Hauterkrankung verschlimmert, eine Selbstverletzung verursacht oder die Integrität der Wundstelle beeinträchtigt.

Kontraindikationen:

- NICHT bei Babys oder Kinder verwenden, der sehr aggressiv, kämpferisch, aufgeregt ist oder suizidale Neigungen zeigt.
- Verwenden Sie NIEMALS Handschuhe an einem Baby oder Kind:
 - o falls eine Infusion oder eine Wundstelle durch das Produkt gefährdet werden könnte
 - o bei einer Dislokation oder Fraktur an der betroffenen Extremität.

Nebenwirkungen:

Schwere emotionale, psychologische oder physische Probleme können auftreten: falls das angewandte Produkt unangenehm zu tragen ist oder falls es die Bewegung stark einschränkt. Falls die oben beschriebenen Symptome jemals aus irgendeinem Grund auftreten, sollten Sie die Hilfe einer medizinischen Institution oder der zuständigen Behörde einholen und sich für ein weniger restriktives Produkt oder eine weniger restriktive Intervention entscheiden.

Produktbeschreibung:

Verpackung:

Das Produkt wird paarweise in einem transparenten Beutel verpackt.

Lagerung und Handhabung:

- Dieses Produkt ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert.
- Dieses Produkt kann bei Lagerumgebungstemperaturen und normaler Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit oder hohe Luftfeuchtigkeit, damit die Produktmaterialien nicht beschädigt werden.

**REF**

X-MKK-PM-S (Neugeborene) 0-1 Jahre alt

REF

X-MKK-PM-M (Kleinkind) 1-3 Jahre alt

REF

X-MKK-PM-L (Kind) 3-7 Jahre alt

Komposition:

36% Baumwolle, 64% polyester

Erklärung der Symbole



Hersteller



Herstellungsdatum

MD

Medizinprodukt

REF

Artikelnummer

LOT

Chargennummer



Vor Anwendung Gebrauchsanweisung beachten



Einzelner Patient - mehrfach anwendbar



Trocken lagern



Von Sonnenlicht fernhalten



Nicht steril



Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist



Bedienungsanleitung:

Vor dem Anwenden:

- Führen Sie eine vollständige Beurteilung des Patienten und der Situation durch, um sicherzustellen, dass die Verwendung der Handschuhe angemessen ist.
- Identifizieren Sie die Symptome des Patienten und beseitigen Sie, wenn möglich, die Ursache. Möglicherweise müssen Sie: auf individuelle Bedürfnisse und Abläufe eingehen, die Rehabilitation und pflegerische Maßnahmen erhöhen, die Umgebung verändern oder die Aufsicht erhöhen.
- Verwenden Sie Handschuhe nur dann, falls alle anderen Optionen fehlgeschlagen sind. Verwenden Sie das am wenigsten einschränkende Produkt für den kürzesten Zeitraum, bis Sie eine weniger restriktive Alternative gefunden haben. Die Patienten haben das Recht, frei von Einschränkungen zu sein.
- Holen Sie, wenn möglich, vor der Anwendung die Zustimmung des Patienten, Erziehungsberechtigten oder Vormundes ein. Erklären Sie dem Patienten und/oder dem Vormund den Grund für die Anwendung der Handschuh, um die Zusammenarbeit zu gewährleisten.
- Eine Handschuh darf nur in Übereinstimmung mit dem individuellen Behandlungsplan (Individualized Care Plan=ICP) des Patienten verwendet werden. Der ICP stellt eine Bewertung durch ein interdisziplinäres Team dar. Dieses kann aus folgenden Personen bestehen, ist aber nicht auf diese beschränkt: Patient, Ergotherapeut, Krankenpfleger/in, Arzt/Ärztin und Angehörige des Sozialen Dienstes. Der ICP sollte Folgendes umfassen: restaurative Pflege, Patiententlassung und Dekubitusprophylaxe.

Anwendungshinweise (wiederholen Sie die Schritte 1-3 für jeden Handschuh):

1. Stecken Sie die Hand des Patienten in den Handschuh, mit der Handfläche nach unten.
2. Wickeln Sie das Armband um den kleinsten Teil des Handgelenks des Patienten, oberhalb des Handgelenks, durch den Kunststoffring und sichern Sie es mit dem Klettverschluss.
3. Schieben Sie einen Finger zwischen das Produkt und die Innenseite des Handgelenks des Patienten, um den richtigen Sitz zu gewährleisten. Der Gurt muss fest sitzen, darf aber die Durchblutung nicht beeinträchtigen.

Hand / Finger anschauen:

1. Fassen Sie unter die Inspektionsöffnung, lösen Sie den Klettverschluss und ziehen Sie die Klappe zurück, um die Hand freizulegen.
2. Um die Inspektionsöffnung zu schließen, stecken Sie das Ende des Handschuhs ein und drücken Sie den Klettverschluss fest.

Stellen Sie eine Überwachung gemäß den Einrichtungsrichtlinien sicher. Überprüfen Sie, ob die folgenden Punkte gewährleistet sind:

- Die Handschuhe sind ordnungsgemäß zu sichern. Bei zu enger Anwendung wird die Durchblutung beeinträchtigt; bei zu lockerer Anwendung kann der Patient seine Hand aus dem Handschuh herausziehen;
- Die Handschuhe sind intakt, nicht gerissen oder beschädigt, und der Klettverschluss schließt sicher. Lassen Sie es NICHT zu, dass Patienten das Handschuhmaterial oral aufnehmen können;
- Der Patient darf den Handschuh nicht mit den Zähnen oder auf anderem Wege entfernen und sich selbst verletzen können;
- Seien Sie wachsam, falls sich der Patient nicht im Bett befindet. Patienten, die sich bewegen, während sie diese Handschuhe tragen, könnten dem Risiko ausgesetzt sein, dass sie sich durch einen Sturz verletzen.

Einzelner Patient - mehrfach anwendbar:

Die Wiederverwendung dieses Produkts bei verschiedenen Patienten kann zu Kreuzkontaminationen oder Produktfehlfunktionen führen. Human Protection B.V. oder sein Vertreter kann nicht für die Risiken haftbar gemacht werden, die sich aus der Wiederverwendung von Produkten zur Verwendung bei einzelnen Patienten an mehreren Patienten ergeben.

Waschanleitung (falls zutreffend):

- Befestigen Sie alle Schnallen und Verschlüsse, um das Risiko von Beschädigungen während der Wasch- und Trockenzeit zu vermeiden. Für eine maximale Lebensdauer sollten Sie die Wäsche in einem Wäschesack waschen.
- Klettverschlüsse können nach wiederholtem Gebrauch oder Waschen Flusen sammeln, was die Griffestigkeit verringert. Verbinden Sie vor dem Waschen Klett und Flausch unter Zug, um Flusenbildung zu vermeiden. Verwenden Sie bei Bedarf eine steife Borstenbürste, um Flusen vom Klett zu entfernen.
- Für nicht kontaminiertes Material verwenden Sie Wasch- und Trockenzyklen bei niedrigeren Temperaturen, um die Lebensdauer zu verlängern. Die maximale Waschttemperatur beträgt 60 Grad Celsius.





HINWEIS! So wie das Verhalten des Patienten nicht zu 100% vorhersehbar ist, ist auch kein Produkt zu 100% betriebssicher. Die Patientensicherheit erfordert eine regelmäßige Neubewertung und Überwachung gemäß den Richtlinien der Einrichtung. Ein Produkt, das in der Vergangenheit funktioniert hat, kann sich als ungeeignet erweisen, falls sich der psychische oder physische Gesundheitszustand des Patienten ändert. Wenden Sie NIEMALS ein Produkt an, das Sie für unsicher halten. Wenden Sie sich an die zuständige Behörde / eine medizinische Institution, falls Sie Fragen zur Patientensicherheit haben.

Zusätzliche Warnhinweise:

1. Unsachgemäße Anwendung oder Verwendung der Handschuhe kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
2. Überwachen Sie IMMER die Patienten nach den Richtlinien der Einrichtung.
3. Beachten Sie, dass eine ständige Überwachung erforderlich sein kann bei:
 - o aggressiven oder unruhigen Patienten; und
 - o Patienten, bei denen die Gefahr besteht, dass sie beim Erbrechen ersticken. Dazu gehören auch Patienten in Rückenlage oder die nicht in der Lage sind, sich aufzurichten. Falls der Patient sich erbricht, könnte er das Erbrochene verschlucken und ersticken.
 - o Seien Sie bereit, bei ersten Anzeichen von Gefahr einzugreifen. Bei solchen Patienten muss regelmäßig der physische und psychische Zustand überprüft und bewertet werden.
4. Modifizieren oder reparieren Sie dieses Produkt NIEMALS. IMMER vor jedem Gebrauch prüfen: Überprüfen Sie, ob Nähte oder Teile beschädigt sind; auf gerissene, geschlitzte oder ausgefranste Materialien sowie Verschlüsse, Schnallen oder Klettverschlüsse, die nicht sicher halten. Verwenden Sie KEINE verschmutzten oder beschädigten Produkte. Eine solche Verhaltensweise könnte zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Beschädigte Produkte gemäß der Einrichtungsrichtlinie für biogefährdende Materialien entsorgen.
5. NICHT zuhause verwenden.
6. Setzen Sie dieses Produkt NIEMALS einer offenen Flamme, Feuer, Tabakwaren oder starken Wärmequellen aus. Einige Produkte können schmelzen oder sich dabei entzünden und verbrennen. Vorschriften hinsichtlich des Rauchens innerhalb der Einrichtung sollten strikt eingehalten werden.
7. Melden Sie STETS schwere Vorfälle an Human Protection B.V., sein Vertreter und die zuständigen Behörden vor Ort.