

RECAcare
by RECA Med



Gebrauchsanweisung

Analtampon zur Verhinderung
des unwillkürlichen Stuhlabganges




Hier die einzelnen Schritte:

- Waschen Sie sich die Hände und entfernen Sie anschließend die Folie.
- Wickeln Sie den Rückholfaden ab.
- **Weichen Sie RECAcare in warmem Wasser ein und drücken Sie den Tampon danach aus.**
- Setzen Sie den Tampon auf den Einführstab.
- Nehmen Sie eine bequeme Position ein (Rückenlage oder stellen Sie ein Bein hoch, z. B. Stuhl oder Toilette).
- Führen Sie den Tampon in den Darm ein und ziehen Sie danach den Einführstab heraus (bei der Berührung des Schließmuskels entsteht unter Umständen ein Kneifreflex, bitte warten Sie ca. 8-10 Sekunden bis der Reflex abklingt und führen den Tampon dann ein).
- Sie können **RECAcare** jederzeit mit dem Rückholfaden während des Toilettenganges entfernen und im Hausmüll entsorgen.

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig:

- Wenn Sie möchten, fixieren Sie den Faden mit einem hautfreundlichen Pflaster.
- Entfernen Sie den Tampon nach spätestens 20 Stunden.
- Beim Wasserlassen müssen Sie den Tampon nicht entfernen.
- Beim Schwimmen ist ebenfalls kein Entfernen notwendig.
- Reinigen Sie den Einführstab nach Gebrauch mit pH-neutraler Seife und spülen Sie ihn gründlich mit Wasser ab.

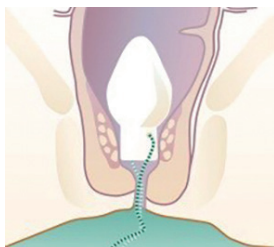

Größe und Artikelnummer:

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Art.-Nr. | 20.3 | 20.4 | | | 30.1 |
| Ø / Länge mm | 25/52 | 35/63 | | | 25/115 |
| Art.-Nr. | 40.24 | 40.30 | 40.35 | 44.24 | 44.35 |
| Ø / Länge mm | 23/48 | 28/50 | 33/55 | 23/48 | 33/56 |

Material: PVA Schaumstoff; Fäden: 100% Polyester;
Packungsgrößen: 50 oder 100 Stück; Test Set: 15 Tampons
in unterschiedlichen Größen und Formen, 1 Einführstab
Hilfsmittel-Nr.: 15.25.17.0003 + 0004

CE 0197

04/23-4.2.4-1/4

Ⓢ Nicht zur Wiederverwendung

📖 Gebrauchsanweisung beachten

Gegenanzeigen:

- Blutungen unklarer Herkunft
- Darmverschluss
- akute Entzündungen im Darmbereich
- unklare Schmerzen im Bauchraum oder Perforation des Darmes

Nebenwirkungen:

Bei der Anwendung von RECAcare kann es gelegentlich zu einem Druckgefühl kommen. Dieses verschwindet normalerweise nach 3-4 Tagen und sicher nach Entfernen des Tampons.

Warnung:

Bitte halten Sie sich an die Gebrauchsanweisung. RECAcare ist ein Einmalprodukt. RECA Med übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden bei unsachgemäßer Anwendung. Bei Mehrfachanwendung können die hygienischen Bedingungen nicht mehr gegeben sein.

🏠 Gustav-Schickedanz-Str. 8 Tel: +49 (0) 911 7406620
D - 90762 Fürth Fax: +49 (0) 911 7406621
www.recamed.de freiheit@recamed.de

RECA Med
Medical Care Products