

RICHTIGE GRÖSSE



KONTROLLIERTE DEHNUNG



KONTROLLIERTE ÜBERLAPPUNG



1. KOMPONENTE (KURZZUGBINDE)



- Den Fuß in einem Winkel von 90° halten („Zehen zur Nase“).
- Darauf achten, dass die wattierte Schicht der weißen Binde in direktem Hautkontakt ist.
- Am Zehenansatz anlegen und zum Befestigen des Verbandes mit einer oder zwei Bidentouren um den Fuß wickeln.



- Knöchel mit einer Achtertour umwickeln und dabei darauf achten, dass die Ferse vollständig bedeckt ist.
- Die Binde ab dem Knöchel spiralförmig um das Bein wickeln und so dehnen, dass die auf der Binde aufgedruckten Ellipsen einen Kreis bilden.
- Eine korrekte Überlappung ist erreicht, wenn der aufgedruckte Druckindikator vollständig überdeckt ist (**50%** oder **2/3**).



- Den Verband bis 2 cm (ca. 2 Finger breit) unter der Kniekehle wickeln.
- Überschüssiges Material abschneiden und das Verbandende mit einem Rollenpflasterstreifen fixieren.

2. KOMPONENTE (LANGZUGBINDE)



- Die hautfarbene Binde über die weiße Binde wickeln und dabei dieselbe Wickeltechnik anwenden.
- Einen Rand der weißen Binde an den Zehen und am Knie sichtbar lassen, sodass sich nur die weiße Binde in direktem Hautkontakt befindet.



- Eine korrekte Überlappung ist erreicht, wenn der aufgedruckte Druckindikator vollständig überdeckt ist (**50%** oder **2/3**).



- Bis einen Finger breit unter der weißen Binde wickeln.
- Überschüssiges Material abschneiden.
- Nach dem Anlegen der hautfarbenen Binde den Verband leicht andrücken, um eine vollständige Kohäsion sicherzustellen.



Einfache und zuverlässige Druckerzeugung



Gleichbleibender Kompressionsdruck ohne Verrutschen



Kontrollierte Kompression in Ruhe und Bewegung



Hoher Tragekomfort bei Tag und Nacht

Anwendungsgebiete UrgoK2:

Behandlung venöser Unterschenkelgeschwüre, venöser Ödeme und Lymphödeme, die eine starke Kompression erfordern.

Anwendungsgebiete UrgoK2 Lite:


Behandlung venöser und gemischt arterio-venöser Unterschenkelgeschwüre, sowie venöser Ödeme und Lymphödeme, die eine mäßig starke Kompression erfordern.

Einige Empfehlungen vor dem Wickeln:

- Stellen Sie sicher, dass der Knöchel-Arm-Druck-Index über 0,8 (UrgoK2) bzw. 0,6 (UrgoK2 Lite) liegt.
- Berücksichtigen Sie auch die Form der zu wickelnden Extremität, d.h. eventuelle Hervorhebungen oder Absenkungen sind aufzufüllen damit der gewünschte Druck überall gleichmäßig einwirken kann.
- Der Verband sollte möglichst direkt am Morgen nach dem Aufstehen angelegt werden oder nachdem das Bein eine Stunde lang hochgelagert wurde, um orthostatische Ödeme zu reduzieren.


UrgoK2

KADI* > 0,8
ca. 40 mmHg**

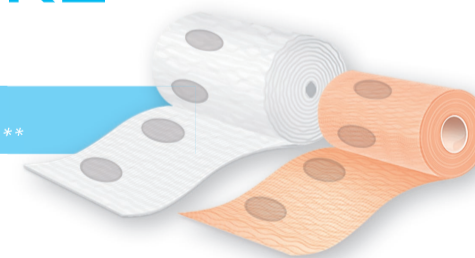

UrgoK2 Lite

KADI* 0,6-0,8
ca. 20 mmHg**

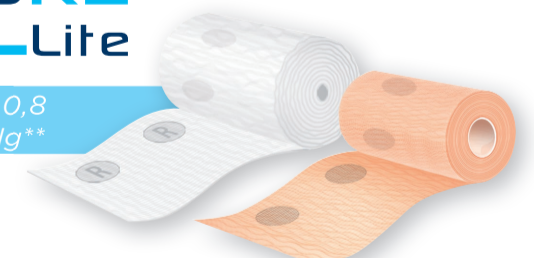

Empfohlenes Material

Inhalt	Stück	Art.-Nr.	PZN
UrgoK2			
Knöchelumfang 18 - 25 cm Bindenbreite 10 cm	OP à 1 Set	510630	05 005 120
Knöchelumfang 25 - 32 cm Bindenbreite 10 cm	OP à 1 Set	510631	05 005 189
UrgoK2 Lite			
Knöchelumfang 18 - 25 cm Bindenbreite 10 cm	OP à 1 Set	510652	08 464 130
Knöchelumfang 25 - 32 cm Bindenbreite 10 cm	OP à 1 Set	510653	08 464 153

Bitte vor Gebrauch die Packungsbeilage beachten.

* Knöchel-Arm-Druck-Index

** Durchschnittlich erreichter Kompressionsdruck in der Knöchelregion